

# Kosmetologia Estetyczna

1/2021

# NE

Kosmetologia • Estetyka • Dermatologia • Zdrowie

**BLIZNY  
SKUTECZNE  
TERAPIE ŁĄCZONE**

**TRĄDZIK  
HOLIŚTYCZNIE**

**INNY WYMIAR ZABIEGÓW**

- ✓ PORAZENIE NERWU TWARZOWEGO
- ✓ GLIKOZAMINOGLIKANY
- ✓ MEZOTERAPIA
- ✓ JAD PSZCZELI

**MAKIAŻ  
PERMANENTNY**

- ✓ MOŻLIWOŚCI A OCZEKIWANIA
- ✓ USUWANIE CZY NEUTRALIZACJA?

SYSTEM BIOFOTONICZNY

**Kleresca®**

**DERMATOLOGIA  
W INNYM ŚWIETLE**



PCZK

**INNOWACYJNA  
TECHNOLOGIA  
BIOFOTONICZNA**

[pczk.com.pl](http://pczk.com.pl)

21,50 zł (w tym 8% VAT)

ISSN 2084-9265



9 772084 926101

LUTY - MARZEC

s. 41

# Najnowsza generacja Icoone®

Icoone® to jeden z najpopularniejszych zabiegów. Wynika to z wysokiej skuteczności tej metody. Prawdziwie przełomowym okazuje się jej połączenie z energią biostymulującego lasera i światła LED, które zastosowano w innowacyjnym urządzeniu Icoone® Laser.

Najnowszy model Icoone® Laser med z 2020 roku ma **aż o 25% zwiększoną powierzchnię aktywną mikrostimulatorów** co przekłada się na jeszcze większą skuteczność zabiegu.

Icoone® to opatentowana technologia, która znana jest na rynku medycyny i kosmetologii od wielu lat. Urządzenie wykorzystuje Multi Mikropeczęrzykową Stymulację (M.M.S.A.) i pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Dzięki temu urządzenie ma wiele zastosowań nie tylko w zabiegach ukierunkowanych na pielęgnację i leczenie skóry, lecz także m.in. w fizjoterapii i medycynie sportowej. Skutecznie likwiduje cellulit, miejscowo zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność mięśni, zapalenia ścięgien oraz wszelkie objawy starzenia się skóry.

## **Unikalność metody**

Patent Roboderm® pozwala na stymulację tkanki na trzech powierzchniach jednocześnie. Dwa zmechanizowane multistymulatory masujące i zasysające skórę wyposażone są w rolki z mikrootworami. Głowice poruszając się jednocześnie w tym samym obszarze, uzupełniają swoje działanie. Dzięki temu precyzyjnie stymulują skórę na danej powierzchni, docierając do najmniejszych jej fragmentów. Ponadto mikrootwory w rolkach, nieco większe względem poprzednich wersjach Icoone®, sprawiają, że masaż skuteczniej oddziałuje na włókna kolagenowe w skórze właściwej. Ulepszona technologia, wzmacnia efekty zabiegu, przy tym nie rozciąga skóry. Praca głowic wsparta jest przez centralną komorę również operującą podciśnieniem. Jest umieszczona pomiędzy mikrostimulatorami i dogłębnie oddziałuje na tkankę tłuszczową. Potrojenie powierzchni stymulacji przyspiesza redukcję komórek tłuszczowych, sprzyja usuwaniu toksyn i zastoju wodnych oraz daje efekt ujędrnienia. **Podwójne głowice to aż 21.600 mikrostimulacji na minutę pracy!**

## **Dodatkowa moc światła lasera i fototerapia LED**

Najnowszym udoskonaleniem, które wykorzystuje Icoone® Laser jest skojarzenie mechanicznego działania z biostymulacyjną energią lasera diodowego i światła LED. To znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia skuteczności zabiegów modelujących sylwetkę. **Fala 915 nm lasera diodowego** przenika bowiem w głąb tkanki, gdzie jest silnie absorbowana przez lipidy w adipocytach. Powoduje to podwyższenie ich temperatury, przyspieszenie procesu lipolizy, a w efekcie prowadzi do zmniejszenia komórek tłuszczowych. Natomiast **światło o długości fali 650nm** oddziałuje na fibroblasty i stymuluje produkcję kolagenu oraz elastyny. Wpływa również na przepuszczalność błony komórkowej adipocytów powodując otwarcie porów w jej obrębie, co umożliwia odprowadzenie uwolnionego tłuszczu do układu limfatycznego bez trwałego uszkodzenia komórek. Fototerapia światłem LED eliminuje obrzęki i stany zapalne. Poprawia krążenie i sprawia, że tkanki są lepiej dotlenione.

## **Przyjazna procedura zabiegowa**

Zabiegi są nie tylko nieinwazyjne i bezbolesne, ale i przyjemne. Odczuwalne jest lekkie zasysanie skóry, które może mieć wręcz działanie relaksujące. Procedura zabiegu jest niezwykle prosta. Rozpoczyna ją 20 minutowy drenaż całego ciała wykonany za pomocą multistymulatorów. Potrójna powierzchnia ssąca Icoone Laser sprawia, że głowice łatwo się przemieszczają, bez konieczności wykonywania dodatkowych ucisków. Podnosi to komfort zabiegu nie tylko dla pacjenta, ale i dla operatora urządzenia. Dwie głowice umożliwiają wykonanie symetrycznego masażu po obu stronach ciała. Redukuje on zastoje wody, odblokowuje węzły limfatyczne i przygotowuje skórę do dalszych działań. Kolejnym etapem jest 10 minutowy program terapeutyczny dobrany do potrzeb pacjenta. Icoone® Laser oferuje lekarzom, kosmetologom i pacjentom **40 programów kosmetycznych dla kobiet, 35 programów kosmetycznych dla mężczyzn oraz 16 programów medycznych**, ukierunkowanych na konkretny problem terapeutyczny lub obszar ciała. Do zabiegów modelowania sylwetki wykorzystuje się innowacyjną głowicę Robosolo, która łączy w sobie technologię niezależnie zmechanizowanych rolek z laserem 915nm i światłem LED 650nm. Połączenie to zapewnia wysoką skuteczność w ujędrnianiu skóry, niwelowaniu cellulitu i redukcji złogów tłuszczowych. W wyniku jej działania tkanka otrzymuje 15 600 stymulacji na minutę!



GWARANTOWANE  
REZULTATY

**+25 %**

ZWIĘKSZENIE  
POWIERZCHNI AKTYWNEJ

SYMETRYCZNA  
STYMULACJA

**21600**

MIKROSTYMULACJI  
NA MINUTĘ

CO NOWEGO

**11**

GŁOWIC DO ZABIEGÓW  
PERSONALIZOWANYCH

CO NOWEGO

**40**

PROGRAMÓW NA CIAŁO  
I TWARZ DLA KOBIEC

CO NOWEGO

**35**

PROGRAMÓW NA CIAŁO  
I TWARZ DLA MĘCZYCZYN


100% NATURALNA I BEZBOLESNA TECHNOLOGIA

**icoone**<sup>®</sup>  
LASER • MED



- Widoczne rezultaty już od pierwszej sesji.
- Możliwość stosowania codziennie.
- Głowice dostosowane do każdego typu skóry, nawet najbardziej delikatnej i problematycznej.
- Precyzja w leczeniu najbardziej wrażliwych i czułych miejsc.



 icoone\_poland



 Icoone

**MROTEX GROUP**

ul. Robotnicza 68, 53-608 Wrocław / PL  
tel. 693 072 500 / office@mrotex.com  
www.icoone.pl